

FISSATORE posturale in "POLSO-TRACOLLA"



SEQUENZA DI COLLOCAZIONE



Ref: FI-410
Ref: FI-410P



PER LESIONI DI BRACCIO O MANO

Nelle lesioni di braccio o mano, si raccomanda la sua fissazione al corpo per evitare i colpi involontari.

I nostri prodotti FI-410 e FI-410P (pediatrici) è una polsiera imbottita unito ad una cinghia composta per distinti materiali saldati fra loro con suono ultracustico alla quale si può aderire il velcro del estremo.



**Con questo disegno e collocazione,
il paziente non subisce il peso del braccio
permanentemente sul collo.**

2mil *artesanía sanitaria, s.l*

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) SPAGNA

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENZA: +34-606957883

E-Mail: 2mil@2mil.com

www.2mil.com



Introdurre la mano del braccio da soggettare, per la polsiera fino al polso. Mettere la mano all'altura del corpo che desiderate e appoggiare la cinghia sulla spalla.



Volteggiare la cinghia per la spalla in cinghia.



Piegando l'antebraquio, aderire con velcro nel punto che corrisponda.

Distributore