

"VELPEAU" semplice



SEQUENZA DI COLLOCAZIONE



Ref: FI-500

Raccomandato per la fissazione del braccio dopo
la collocazione di un REGOLATORE CARDIACO



Fabricato con tessile ipoalergenico saldati per suono ultracustico
imbottito con nappa libera di resina, è di formato universale.

Questo prodotto non contiene foam nella sua composizione,
giacchè questo materiale genera calore e in conseguenza sudore
ed irritazione della pelle.



Passare il braccio per la ghiera fino al
bicipite braquial.



Involtare il corpo per la spalla.



Agganciare all'anello e fissare
con il VELCRO. Introdurre il
braccio fra il corpo e la pezza.

Distributore

2mil *artesanía sanitaria, s.l*

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) SPAGNA

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENZA: +34-606957883

E-Mail: 2mil@2mil.com

www.2mil.com

