

"VELPEAU" semplice

(prodotto composto di due pezze)



SEQUENZA DI COLLOCAZIONE



Ref: FI-505 XL
FI-505 L
FI-505 M
FI-505 S

Fabbricati con tessuti ipoallergenici saldati per suono ultracustico imbottito con nappa libera di resina.



Una perfetta soggezione, molto fresca e facile di togliere e mettere per igiene, solo due velcri.

Questo prodotto non contiene foam nella sua composizione, giacchè questo materiale genera calore e in conseguenza sudore ed irritazione della pelle.



Introdurre per la 1ª pezza il braccio la fissare per un estremo fino al bicipite braquial.



Passare la pezza per la spalla involtando il corpo, agganciare all'anello e fissare con il velcro alla stessa pezza.



Introdurre la mano della 2ª pezza, passare questa fra la 1ª pezza ed il corpo. Collocandola sulla spalla, lasciate cadere sulla schiena, passarla un'altra volta fra la schiena e la 1ª pezza e involtando questa, chiudere con il VELCRO.

Distributore

2miil artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) SPAGNA

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENZA: +34-606957883

E-Mail: 2miil@2miil.com

www.2miil.com

