

CINTA in "OTTO"



DETAGLI DI FISSAZIONE



Ref: FI-600
Ref: FI-610

**Per lussazioni e fratture di clavicole.
Per correggere tendenze di peso di spalle e
formare cifosi.**

Il nostro prodotto FI-600 per bambini fino a 30 kg, è una pezza imbottita con nappa senza resina, fabricata con prodotti tessili ipoalergenici, saldati fra loro per suono ultracustico, al quale gli incorporano delle pezze di velcro così quando lo collochiamo come un bendaggio in otto permetta una fixazione veloce e sicura, facile di togliere e di metere ogni volta che si debba lavare al bambino.



Il FI-610 è er pazienti da 30 a 110 kg offriamo il prodotto FI-610 il quale fabricato con gli tessi materiali è più lungo, più largo e ha punti di saldatura di rinforzo per chè deve sopportare un tensione più grande.

**Come risultato il prodotto è collocato senza
necesità di anelli cuciti, ne cinte rigide, che alla
fine piaga la pelle.**

**Senza GOMMA-SPUMA che genera un calore
eccessivo.**


2mil *artesanía sanitaria, s.l*

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) SPAGNA

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENZA: +34-606957883

E-Mail: 2mil@2mil.com

www.2mil.com

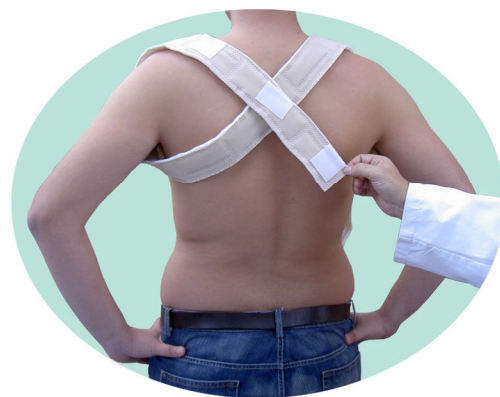

Si debe misurare il prodotto per vedere che quantità dobbiamo tagliare.



Valutare la miura che à bisogno il paziente e tagliare l'eccedente, quando l'abbiamo tagliato mettetelo della stesa maniera che si è misurato.



Rimettere il prodotto a posto facendo attenzione di non fari pieghe nelle ascelle del paziente, procedendo la chiusura del "OTTO" risultante con i velcri, i quali si possono aderire in qualsiasi posto del tessile di velour.

Distributore

