

# FIJADOR postural en "BANDOLERA" F




SECUENCIA DE COLOCACIÓN



Ref: FI-400F  
Ref: FI-400FP

Con este diseño y colocación el paciente no sufre el peso del brazo permanentemente sobre el cuello.

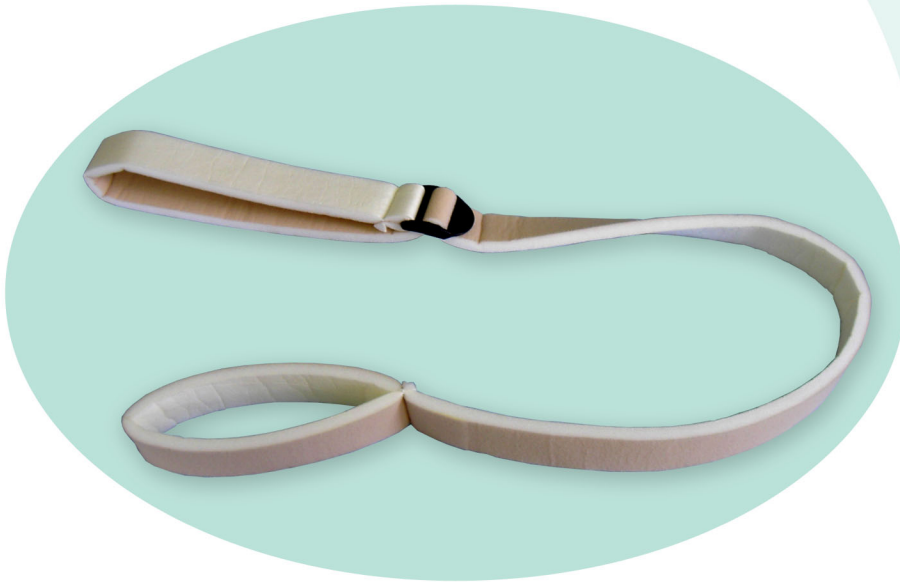

Dentro de su gama de Fijadores Posturales, 2mil ofrece el modelo FI-400FP especialmente diseñado para pacientes que no superen los 60 kilogramos de peso.



Cinta compuesta por distintos materiales soldados entre si con almohadillado Foam.

**2mil** artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) ESPAÑA

☎ & FAX: +34-916301254 URGENCIAS: +34-606204400

E-Mail: 2mil@2mil.com

www.2mil.com



Viéndose la parte de color de la cinta. Introducir esta por el brazo según figura.



Pasar por detrás de la espalda en forma de bandolera.



Volcarlo por el hombro e introduciendo la muñeca ajustar a través de la hebilla según se observa en la figura.

Distribuidor

