

FIXATEUR de position sur "POIGNET-BANDOULIÈRE"



SÉQUENCE DE PLACEMENT



Ref: FI-410
Ref: FI-410P



Introduire la main du bras lésioné à travers le poignet de force rembourré, situer la main à l'hauteur du corps que l'on désire et appuyer le ruban sur l'épaule.



Tourner le ruban par l'épaule en bandolière.



Doublant l'avant bras, fixer avec le velcro.

POUR LÉSIONS D'UN BRAS OU D'UNE MAIN

Pour les lésions de bras ou de mains, on recommande sa fixation au corps pour éviter les coups involontaires.

Nos produits FI-410 et FI-410P (pédiatriques) c'est un poignet de force rembourré unie à un ruban composé de différents matériaux soudés entre eux par ultrason auquel on peut adhérer le velcro du bout.



**Avec ce dessin et cette colocation,
le patient ne subit pas tout le temps le poids du
bras sur le cou.**



Distributeur

2miil artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) ESPAGNE

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENCE: +34-606957883

E-Mail: 2miil@2miil.com

www.2miil.com