

# "VELPEAU" simple



## SÉQUENCE DE PLACEMENT



Ref: FI-500

Recommandé pour la fixation du bras après le placement d'un régulateur cardiaque



Fabriqué avec des tissus hypoallergéniques sondés par ultrason rembourré d'agneau tanné sans résine; sa taille est universelle.

Ce produit ne contient pas de foam, puisque ce matériel donne chaud et par conséquent il fait transpirer et irrite la peau.



Passer le bras à travers l'anneau jusqu'au biceps braquial.



Entourer le corps par le dos.



Accrocher à l'anneau et le fixer avec le VELCRO. Introduire le bras entre le corps et la pièce.

Distributeur

**2mil** artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) ESPAGNE

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENCE: +34-606957883

E-Mail: 2mil@2mil.com

www.2mil.com

