

"VELPEAU" simple

(produit composé de deux pièces)



SÉQUENCE DE PLACEMENT



Ref: FI-505 XL
FI-505 L
FI-505 M
FI-505 S

Frabrique avec des tissus hipoalergissants soudés par ultrason rembourré d'agneau tanné sans résine.



Une parfaite fixation, très fraîche et facil d'enlever et de mettre pour la toilette, seulement deux velcros.

Ce produit ne contient pas de foam, puisque ce materiel donne chaud et par conséquent il fait transpirer et irrite la peau.



Introduire par la 1ère pièce le bras lésioné à l'extremité jusqu'au biceps braquial.



Passer la pièce par le dos entourant le corps, l'accrocher à l'anneau et fixer avec le velcro à la même pièce.



Introduire la main dans la 2ème pièce, Passer celle-ci entre la 1ère pièce et le corps. En la plaçant sur l'épaule, laissez tomber sur le dos, repasser la entre le dos et la 1ère pièce et l'entourant fermer avec le VELCRO.

Distributeur



2mil artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) ESPAGNE

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENCE: +34-606957883

E-Mail: 2mil@2mil.com

www.2mil.com