

# RUBAN dans "HUIT"



Ref: FI-600  
Ref: FI-610

**Pour luxations et fractures de clavicules.  
Pour corriger la charge des épaules et la  
formation de cyphose.**

Notre produit FI-600 pour enfant de jusqu'à 30kg, c'est une pièce rembourrée avec une peau d'agneau sans résine fabriquée avec des produits textiles hypoallergéniques soudés entre eux par ultrason, auquel on incorpore des pièces de VELCRO de manière que quand on le place comme un bandage en huit il permet une fixation rapide et sûre, facile à enlever et à remettre chaque fois qu'on lave l'enfant.



Le FI-610 est pour des patients de 30 à 110kg nous offrons le produit FI-610 qui fabriqué avec les mêmes matériaux est plus long, plus large et a des points de soudure de renfort puis que il doit supporter plus de tension.

**Comme resultat c'est un produit placé sans anneaux, ni coutures, ni rubans rigides qui peuvent faire une plaie.**

**Exempt de caoutchouc-mousse qui donne trop chaud.**

**2mil** artesanía sanitaria, s.l

✉: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) ESPAGNE


☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENCE: +34-606957883

E-Mail: 2mil@2mil.com

www.2mil.com



## DETAIL DE FIXATION

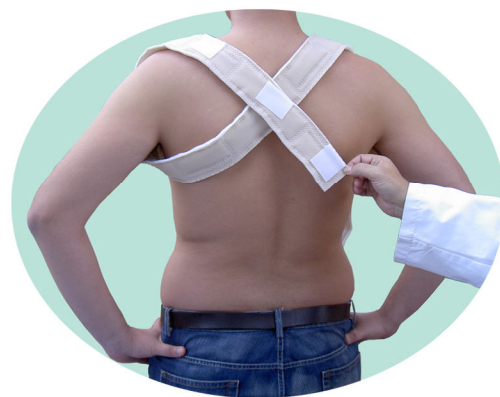

On doit mesurer le produit pour savoir quelle quantité couper.



Valorer la mesure dont le patient a besoin et couper le reste et une fois coupé, le remettre de la même façon qu'on a mesuré.



Remettre en place le produit en évitant les plis sous les aisselles du patient, fermant le « HUIT » avec les velcros, que l'on peut adhérer sur n'importe quel point du tissu en velour.

Distributeur