

RUBAN de TORSE



PROCESUS D'ANCLAGE DES TENSEURS



Ref: SU-225

À ÊTRE UTILISÉ SUR FIXANT LES PATIENTS



La ceinture peut rester dans le lit fixée au lit par des tenseurs.

Facile accouplement du patient, la ceinture se ferme à l'arrière du torax.


Une fois fermée on la fixe avec velcro.

On l'assure avec un ruban. On fixe le tenseur de manière que le patient puisse se tourner d'un côté.


1eme INTRODUCTION:



2eme INTRODUCTION:

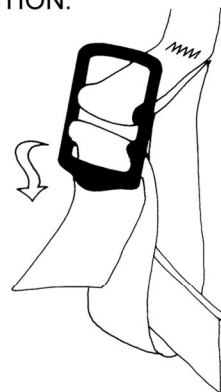

TENSER:

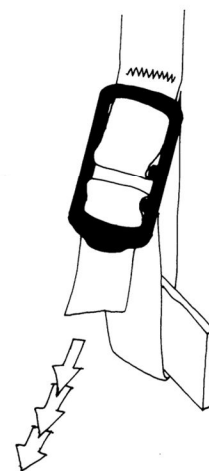

CLAMPER:



2mil artesanía sanitaria, s.l

☒: c/Amadeo Vives nº 8 - 28290 LAS MATAS (Madrid) ESPAGNE

☎ & FAX: +34-916309208 / 1254 URGENCE: +34-606957883

E-Mail: 2mil@2mil.com

www.2mil.com



Distributeur